

*DONJOY*®

DonJoy  
Spinostrap

**EENVOUDIGE RUGBRACE**



enovis™



**DONJOY®**

# DonJoy Spinostrap

## Eenvoudige rugbrace

DonJoy Spinostrap geeft voorschrijvers en patiënten controle over rugondersteuning. De verstelbare schouderbanden, het buigbare exoskeletale dorsale frame en de aanpasbare lumbale gordel maken comfortabele individuele ondersteuning en ontlasting van de thoracale wervelkolom mogelijk. Dankzij de functies van deze halfstijve rugbrace liggen rugondersteuning en kyfotische houdingscorrectie binnen handbereik.

### **INDICATIES**

DonJoy Spinostrap is ontworpen voor ondersteuning, stabilisatie en gedeeltelijke immobilisatie (bewegingsbeperking) van de wervelkolom.

- Ondersteuning van stabiele wervelfracturen
- Verlichting van pijn en vergemakkelijking van correctie van posturale disfunctie door dorsale hyperkyfose
- Posturale disfunctie geassocieerd met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson
- Rechtzetten en ondersteunen van de wervelkolom bij spierinsufficiëntie/zwakte
- Pijnverlichting en ondersteuning bij artrose van de wervelkom







## FUNCTIES EN VOORDELEN



**Halfstijf exoskeletaal dorsaal frame:** voor ondersteuning en ontlasting van de thoracale wervelkolom kan het aluminium worden gevormd om te passen bij de individuele kromming van de rug.

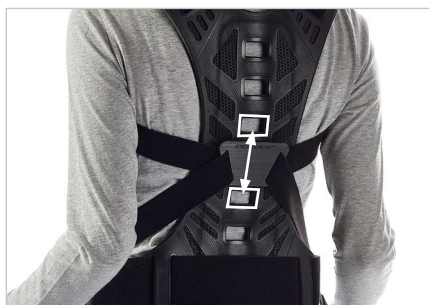


**Verplaatsbare bandgeleider:** kan op verschillende hoogtes op het dorsale frame worden geplaatst om de corrigerende werking op de kyfotische houding te helpen controleren.

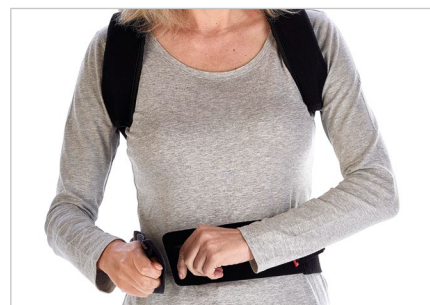


**Verstelbare lendengordel:** maakt gebruik van toegankelijke riemlipjes en vingerzakken om de wervelkolom te ondersteunen terwijl de buik vrij blijft. Kan worden ingekort tot de gewenste lengte.




**Verstelbare schouderriemen:** gebruik fixeerbare hook-loop tabs om de spanning aan te passen, wat helpt bij het corrigeren van een kyfotische houding door de schouders naar achteren te trekken en de rug recht te maken.

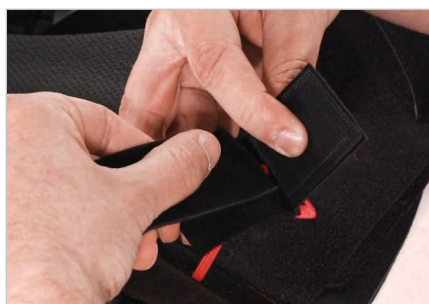


**Krokodillenbandsluitingen:** hiermee kan de lengte van de schouderband en lendengordel worden aangepast voor een handige individuele pasvorm.

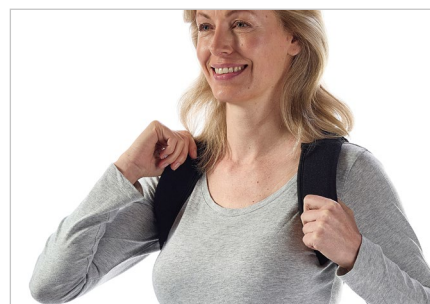

**Axillaire schouderkussentjes:** plat en anatomisch gevormd, ze kunnen worden geplaatst om het draagcomfort voor de oksels te verhogen.

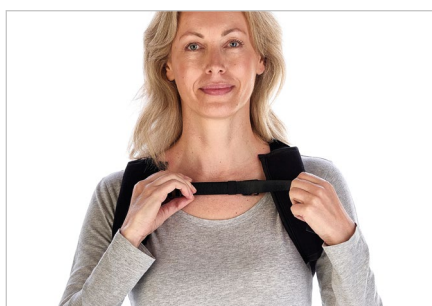

**Verstelbare sternale band:** kan worden bevestigd voor extra comfort in het axillaire gebied.

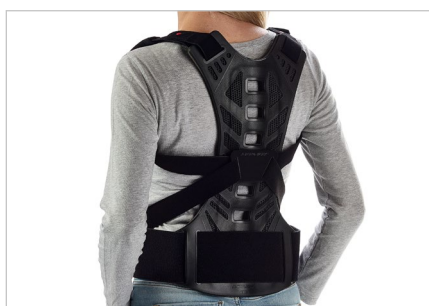

**Slank en low-profile ontwerp:** past onder kleding.

**Lichtgewicht en ademend:** helpt het comfort van de patiënt te garanderen.

**Hypoallergene en zachte materialen:** om huidirritatie te helpen voorkomen. PVC- en latexvrij.

## BESTELINFORMATIE

NAAM	WERVELKOLOM LENGTE C7 - S1	ARTIKELNUMMER	GTIN CODE
DONJOY SPINOSTRAP - S	42 – 52 cm	82-0057-1	0190446773573
DONJOY SPINOSTRAP - M	52 – 62 cm	82-0057-2	0190446773580
DONJOY SPINOSTRAP - L	62 – 72 cm	82-0057-3	0190446773597

# enovis™

*Creating Better Together™*

**DONJOY®**

Enovis™ - DJO Benelux BVBA  
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | België

**enovis.be**



© Enovis™ - MKGBNLBV91 - Rev A - 09/2023 - DonJoy Spinostrap is een medisch hulpmiddel van klasse I met CE-markering. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Fabrikant : DJO LLC.  
\* Samen beter creëren.